

Phrozen Heat&Mix 樹脂混合ステーション

簡単・迅速・均一に攪拌

プリント品質の向上・安定造形に
欠かせないレジンの加温機能も装備。



メーカー希望小売価格
32,000円 (税込)



ハンズフリーで
均一に攪拌




多様なニーズに
対応する3モード



温度環境に左右
されない安定性

均一に攪拌するための 多方向モーションコントロール

Heat&Mixは、多方向のローリングとチルティングを組み合わせ、ボトル全体に素早く、均一に樹脂材を攪拌させ、すべての構成要素が最高性能を発揮できるようパーフェクトに混合されます。

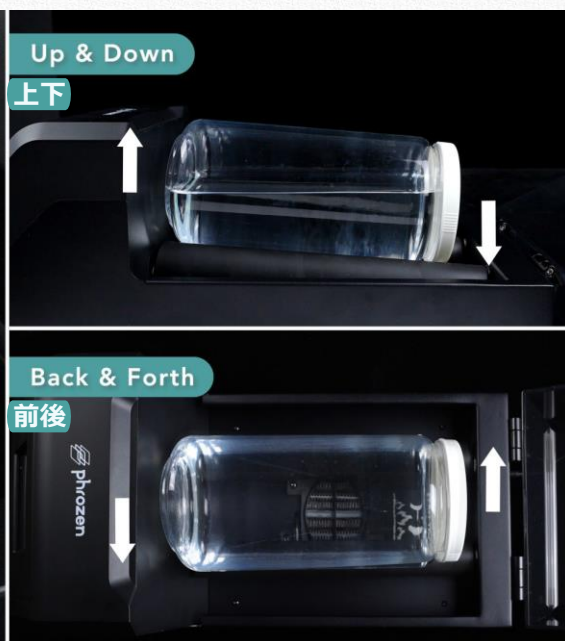

多様なニーズに対応する 3つのモード



🔌 クイックシェイク

プリント前の気軽な準備にお使いください。
レジンを加熱せずに5分間混合します。



🔌🔥 ヒート&シェイク

粘度の高い高充填樹脂を最適に混合するには最高温度50℃のヒート&シェイクモードをご使用ください。



🔌 コンスタント・シェイク

コンスタント・シェイクで最大6時間レジンスタンバイさせておくことで、常に次のプリントに備えることができます。

あらゆるタイプの デンタルレジンに適應します



歯科用
模型レジン
クイックシェイク 5分



歯科用
ジンジバマスクレジン
ヒート&シェイク 5分



デンチャー
レジン
ヒート&シェイク 15~30分



咬合スプリント
レジン
ヒート&シェイク 15-30分



サージカルガイド
レジン
ヒート&シェイク 15-30分



セラミック充填
レジン
ヒート&シェイク 30-45分

様々な形状のボトルとの互換性

一般的な1kg又は500gの
円筒ボトル 又は 角ボトルに対応。
最大ボトルサイズは 直径95 x 225mm。



仕様

- 最大ヒーター温度：50℃
- 製品サイズ：41.6 x 20 x 19.2 cm
- 最大対応レジンボトルサイズ (Ø x L) 9.5 x 22.5 cm
- 重量：4.5 kg
- 電源：24V 5A
- 定格出力：100W

